



MARIE PACS

Release Notes



Výrobce: OR-CZ spol. s r.o., Gorazdova 1477/2, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 48168921

verze: 25012912, vydáno: 29.01.2025

identifikátor dokumentu: MP Release Notes 25012912

Copyright © 2025 OR-CZ spol. s r.o.

MARIE PACS		MD	CE 2265
	MPACS-0000		
	OR-CZ spol. s r.o., Gorazdova 1477/2, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, Czech Republic	SRN: CZ-MF-000028433	GLN: 859421271001
	(01)08594212710014(11)250129(21)MPACS-0000(8012)25012912		

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována žádným způsobem bez písemného souhlasu majitelů autorských práv.

Některé názvy produktů a společností uvedené v tomto dokumentu mohou být ochranné známky příslušných vlastníků.



Obsah

1.	MARIE PACS 25012912	4
2.	MARIE PACS 24082912	12
3.	MARIE PACS 24062514	19
4.	MARIE PACS 24013112	25
5.	MARIE PACS 23121410	31
6.	MARIE PACS 23101312	32
7.	MARIE PACS 23090713	36

1. MARIE PACS 25012912

Funkce:	MARIE WebVision
Verze:	25012912
Datum uvolnění:	29.01.2025

1.1. Změny a zlepšení

LIB: Aktualizace Jetty 12.0.16 -> 12.0.17 (oprava pooling ByteBufferu)

DW: Otočit výchozí rozložení panelů pro MPR/MIP u monitorů postavený

CFG: Podpora přepsání Bootstrap parametrů pomocí proměnných prostředí

WEB: Konfigurovatelné buffery pro webserver a možnost logování požadavků

WEB: API pro vytváření sdílečího linku

DCM: Umožnit nastavit výchozí storageLayer

DW: Podpora základního zobrazení SOPClass Comprehensive 3D SR Storage

DOC: Doplnění popisu provolání prohlížeče o povinné parametry

CLOUD: Podpora automatického přepojení cloudboxu na jiný server bez jeho restartu

LIB: Aktualizace knihoven:

- jetty 11.0.24 -> 12.0.16

- logback 1.5.6 -> 1.5.16

Vytvoření služby na migraci Storage objektů mezi vrstvami úložiště podle štítku studie

AI: Neurona - možnost manuálního odeslání studie

CORE: Automatické použití výchozího jazyka (angličtiny) pro automatické stahování dokumentace, která není v dané lokalizaci dostupná

CORE: Vytvoření tenantního impersonate

CORE: Makra pro psaní SR převést na podporu tenantů

CORE: Upravit negativní role

CORE: HTTP notifikace využívají webklienty

CORE: Nový modul pro výměnné sítě

HL7: Podpora TLS na odesílání HL7

DEX: Podpora DEXClinta na cloudpacsu bez kontrolního serveru

RADPOINT: Doplnění komunikace s Radpointem

DCM: Podpora routingu z cloudpacsu na Dicom AE v lokalitě cloudboxu

CFG: Podpora snippetů do Neovim pluginu

WEB: Urychlení odezvy UI při odesílání dat

DW: Ukládat jazyk, kterým je namluvena hlasová poznámka

DW: Indikátor alokované paměti na statusové liště

DW: V pracovní sadě umožnit přidat všechny aktuálně načtené studie pacienta do pracovního seznam

DW: Pro nakonfigurované SOP classy umožnit blokování přehrávače sérií

DW: Prioritní výběr virtuálních sérií v jednotlivých hanging protokolech

DW: Možnost mazání měření a zavírání záložek bez potvrzení

DW: Kompaktní režim časové osy

DW: Možnost tmavých/světlých OSD při tisku/exportu

DW: Sledování studie - změna chování při příjmu dlouhých sérií

DW: Automatické přepínání výchozího OSD profilu

DW: Úprava přehrávání a záznamu hlasových poznámek

DW: Měření kardiothorakálního indexu (CTR)

DW: Složitě zobrazení třípanelového MPR a MIP

DW: Cachování 3D rekonstrukcí

DW: Optimalizace načítání velkých snímků do DW cache

DW: Podpora převodu řeči na text

Nové role:

- ENABLE_USER_CONFIG_SAVE - User can save user config
- ARCHIVE_TABLE_ACTIONS - User can display archive table actions
- SPEECH_TO_TEXT - User can use speech to text functions
- TENANT_IMPERSONATE - User can impersonate other users from the same tenant for helpdesk purposes

Odebrané role:

- DISABLE_USER_CONFIG_SAVE
- ARCHIVE_QUERY_ONLY

Aktualizace knihoven:

- jetty 11.0.22 -> 11.0.24
- h2 2.3.230 -> 2.3.232
- azure-storage-blob 12.26.1 -> 12.28.1
- hapi 2.3 -> 2.5.1
- httpclient 4.5.14 -> 5.4
- cloudpacs-lib 1.1.3 -> 2.0.0

1.2. Odstraněné chyby

DW: Podpora manuální synchronizace i vzájemně nesynchronizovatelných sérií

DW: Stacking ze SR poskočí o dva snímky/série

WEB: Deadlock v SessionManageru při rekonexi SSE

RADPOINT: Pokud server při odeslání žádanky vrátí 401, je potřeba zneplatnit cache s autentizačními tokeny

DCM: Hromadění vláken SSE spojení, pokud při C-Move na lokalitu není dostupný cílový AET

BASE: Nefunkční reload modulu, který byl načten za běhu aplikace

SHARE: Smazání sdílecího linku při zaseklých mastereventech

DOC: Nefunkční provolání manuálů z menu

BASE: Memory leak při registraci closeables

SHARE: Nelze zobrazit studii přes sdílecí link, pokud má sérii, která neobsahuje žádné snímky

REPL: Replika lokálních dat se nechová korektně, pokud replikuje data přes více domén

WEB: Nezobrazovat UDI na tématu pro mDEX schránky

WEB: Nefunkční výjimky pro přesměrování na HTTPS

WEB: Po aktualizace dostane uživatel běžící na staré verzi WUI chybu 403

WEB: Chybná poskytování zdrojů na webserveru

AUTODEL: Pořadí studií ke smazání v rámci dávky studií ke smazání službou Autodelete není pevně dané

WEB: Požadavky na stažení audia/video končí při použití HTTP2 protokolu chybou

WEB: Pokud se po přerušení opět obnoví SSE spojení, dojde k přesměrování do vyhledávacího dialogu

WEB: Při provolání z Cloudpacs potálu neodpovídá titulek stránky a odhlašovací dialog vzhledu z provolání

WEB: Uživatel po přihlášení vidí pouze černou obrazovku, pokud je zablokováno SSE

WEB: Pokud je zapnuté řízení přístupu, nelze z vyhledávacího dialogu přeposlat data celého pacienta, který se nachází na externím DICOM serveru

DIGI: Chybná detekce verze API pro SIP

RADPOINT: Podpora business-id a názvu ZZ v email šablonách

DW: Duplikace sérií z pracovní sady při změně rozložení oken

DW: Lepší chování při měření a scrollování v neaktivním okně

AI: Replikovat zakládání štítků studie při příjmu AI dat pouze na proxy replice

DEX: Pokud při startu DPGW není dostupná síť/internet, tak se již mDEX bez ručního zásahu nepřipojí

DW3: Při zapnuté automatické synchronizaci se musím čekat na kompletní donáčení první zobrazené série

DCM: Služba dicomizace neuklidí dočasné soubory, pokud dojde místo na disku

DCM: V některých případech neodpovídá C-Move response DICOM standardu

WEB: Pokud uživatel zadá při vyváření sdílecího odkazu pin delší jak 16 znaků, dojde k chybě a odkaz se nevytvoří

CORE: Při mazání Pacs Accountu s více daty dochází ke konfliktu mezi Slave a Configuration replikou

PGMQ: Zaseknutí vlákna consumera v PGMQ messagingu

RADPOINT: Validace metadat studie a zaslání informačních emailů

WEB: Uživatel z provolávání se může dostat k vyhledávacímu dialogu

DCM: Optimalizovat nabízené PC při navazování asociace, aby nebylo nutné zbytečně převádět TS

DCM: Pokud při odesílání dojde k chybě na straně DPGW, přeposílání dat se přeruší a nepokračuje dalším snímkem

DW: Cachování 3D objemů musí respektovat aktuální zoom pro detekci nejbližšího načteného řezu

WEB: Chyba řazení podle jména uživatele v dialogu přeposlat data na uživatele

DCM: Nefunkční odesílání DICOM dat, pokud je vynucená změna TransferSyntax snímku

DEX: Pokud je cíl výměnných sítí dostupný přes více sítí, funguje pouze přeposlání přes mDEX

DW: Chyba windowingu na PET snímku s velmi jemným rescalem

CORE: Changelogy clientské konfigurace na cloudboxu rozbíjí konfiguraci na Cloudpacsu

WEB: Administrativní uživatelé nemohou exportovat data z vyhledávacího dialogu

WEB: Na vzhledu cloudpacs.cz se nezobrazuje štítek

CFG: Chybná distribuční konfigurace DWVold autentizace

DW: Nefunkční komunikace s DWVold instalovaném na lokálním PC (Cross-origin resource sharing)

WEB: Oprava deidentifikace při exportu dat

REPL: Pokud se updated_ts pacienta primárního a sekundárního serveru liší přesně o vteřinu, nedojde k jeho replikaci

COMMON: Oprava HelpDownloaderu pro stahování dvou různých výrobců manuálů

CORE: Možný leak v ondemand licencích

CORE: Souběh nad Principalem ve Storage/PacCounteru

REPL: Plná replika HCF nezavírá HTTP klienta

DW: Zaseknutí prohlížeče, pokud server vrátí pro DICOM hlavičky prázdnou hodnotu

WEB: Chybná validace formuláře pro anonymizaci dat v okně pro přeposílání dat

DW: VolumeCache nereflexuje změnu(kreslení) segmentace

DW: Nefunkční vytvoření vlastního předvoleného okna

DW: Inverze snímku nereflexuje společný windowing pro sérii

WEB: Problém souběhu updatu nad DWImage při ukládání dat do DWCache

WEB: Na hledání žádank v UI se neuplatňuje limit na maximalní počet záznamů

CORE: Nelze smazat DICOM data, pokud se používá koš

CORE: Při hledání skupin uživatele v LDAP se v query neescapují speciální znaky v DN uživatele

CORE: Chybějící DB index v tabulce viewed_flag nad sloupcem viewed_ts

WEB: Zbytečná kontrola licence počtu otevřených studií při otevírání studie

WEB: Nefunkční export ve Firefoxu kvůli nedostatečnému nastavní content-security-policy

DW: Nefunkční téma CD vieweru

DW: Chyba při vytváření hlasové poznámky

DEX: Neukončená vlákna http klienta při specifické mDEX komunikaci

WEB: Uživatel, který má povoleno pouze jedno současné přihlášení, může vyčerpat více licencí

ExchangeClient: NPE v ExchangeClientAPI

DCM: Duplicitní záznamy Dicom AE při autokonfiguraci

CLOUD: Nepředávání domény v některých HTTP requestech z cloudboxu

CORE: Opravy v updatovacím skriptu pro verzi 1.11

AI: SR report generovaný Milvue ExternalProcessingem nejde uložit, není pro něj v asociaci PC

DCM: ClassCastException při kopírování snímku, kterému chybí PixelData do DWCache

KEYSERVICE: Problém při správě certifikátu pomocí ClientKeyService

MONITORING: Příliš brzké varování o procházejícím certifikátu

DIGI: Špatné zobrazení tlačítka pro uložení při dlouhém seznamu z worklistu

DIGI: Procházení pracovní sady kolečkem myši

WEB: Při odesílání do výměnných sítí zobrazovat možnost výběru sítě pouze v případě, že jich je k dispozici více

WEB: Zobrazení posledního přihlášení ve správě stanic

DW: Při dvojkliku na časovou osu zobrazit informaci, že se něco načítá

DW: Podpora zobrazení objemů ze série s více MF

DW: Nezobrazení popisků obratlů

DW: Export samotných EKG do archivu vytvoří prázdný archiv

DW: Příliš dlouhý název záložky

DW: Přepnutí nástroje na L+P tlačítko myši i když to nemá být umožněno

DW: Hanging protokol zobrazí sérii podle seriesMatchedIndex, přestože taková série nebyla nalezena

DW: DW posílá dotaz na preview bez DWID

DW: Přecházení mezi panely při započnutém vícefázovém měření se nikdy nedokončí

DW: Chybějící funkce pro stejnou velikost zobrazení na monitorech se stejným rozlišením

Funkce:	MARIE Portal
Verze:	25012912
Datum uvolnění:	29.01.2025

1.3. Změny a zlepšení

Rozšíření možností odesílání dokumentace z PACS archivu (MAPO-3556)

KLON - Provolání Portálu stejným způsobem jako DPGW (MAPO-3582)

Stavy nálezů (MAPO-3606)

Rozšíření práce se štítky (MAPO-3650)

Přijetí a zpracování tokenu (MAPO-3585)

Nastavení sloupců záložek a práce s nimi (MAPO-3600)

Úprava uživatele / prac. místa pro přiřazení stavů (MAPO-3608)

Výběrovník pro změnu stavu a priority nálezu v přehledu nálezů (MAPO-3609)

Úprava dialogu pro vytvoření / editaci nálezu (MAPO-3610)

Vrácení zpět na seznam vyšetření po opravě pac či vyš (MAPO-3633)

Import DICOM vyšetření - dicom dir a optimalizace (MAPO-3642)

Správa podepisovacích certifikátů (MAPO-3643)

KLON - specimen MMG (MAPO-3648)

Možnost oštítkovat vyšetření z přehledu (MAPO-3651)

Automatické obnovování seznamu vyšetření v prac. seznamu (MAPO-3652)

Statistika oštítkovaných vyšetření (MAPO-3653)

Zobrazit / skrýt logiku práce se stavy a prioritami na základě nastavení (MAPO-3658)

Založení nálezu (MAPO-3659)

Umožnit změnu stavu na Dokončeno (MAPO-3660)

Změny stavů v případě, že je stav v Druhém čtení (MAPO-3661)

Změny po oponentuře z 19.11. (MAPO-3662)

Optimalizace chování po loginu (MAPO-3663)

KLON - Menu pod 3 tečkami a jeho centrování na stránce (MAPO-3605)

KLON - Pracovní místa - sloupec název (MAPO-3613)

Portal, Sejf - úprava úvodní stránky (MAPO-3624)

KLON - Možnost reset TOTP přes web (MAPO-3625)

Optimalizace nastavování produktů (MAPO-3656)

Edit workplace - nepředvyplněné hodnoty formuláře (MAPO-3664)

Odeslání dokumentace - DICOM (MAPO-3677)

Tisk vyšetření (MAPO-3681)

Oprávnění v menu (MAPO-3685)

Při určité šířce okna nejsou vidět data v gridu (MAPO-3680)

Optimalizace založení nové žádanky (MAPO-3684)

1.4. Odstraněné chyby

KLON- Dlaždice v Portále (MAPO-3665)

Neošetřená výjimka v detailu zdravotnické dokumentace (MAPO-3676)

Nový filtr - naposledy použito - bílá stránka (MAPO-3679)

KLON- portal-zadanka-prilohy-chybi datum (MAPO-3686)

Funkce:	MARIE Dr.Sejř
Verze:	25012912
Datum uvolnění:	29.01.2025

1.5. Změny a zlepšení

Správa oprávnění, limitů a dalšího nastavení v GUI - část 2 (DS-1001)

Sdílení pomocí QR kódu (DS-1217)

KLON - 5218-FNM - DrSejř II (DS-1276)

Správa domén (DS-963)

Úprava vzhledu uživatelského rozhraní pro FN Motol - dle přiloženého manuálu (DS-1282)

Oznámení o překročení limitů - BE i FE (DS-1283)

Tlačítko pro návrat na domovskou obrazovku spolu s tlačítkem "zpět" (DS-1284)

Úprava notifikací - BE část (DS-1285)

Úprava notifikací - FE část (DS-1286)

Úprava manuálu a podmínek užití - BE část (DS-1287)

Úprava manuálu a podmínek užití - FE část (DS-1288)

Administrační sekce pro odblokování zablokovaného loginu (DS-1236)

Podpora frontendu pro režim "QR code" - úpravy upload stránky (DS-1262)

Sdílení pomocí QR kódu - podpora na backendu (DS-1263)

Podpora frontendu pro režim "QR code" - stránka pro sdílení vytvořené zásilky (DS-1264)

Úpravy na stránce odeslaných zásilek včetně podpory nových stavů zásilky (DS-1265)

Podpora frontendu pro režim "QR code" - akce Odeslat emailem (DS-1266)

Podpora frontendu pro režim "QR code" - akce Stažení PDF (DS-1267)

Podpora frontendu pro režim "QR code" - akce Tisk (DS-1268)

Úpravy upload stránky - rozšíření synchronizace o čekání na stav, kdy je transfer na serveru kompletně dokončen (DS-1269)

HTML šablona pro sdílení zásilky (DS-1270)
Začlenění HTML šablony pro sdílení zásilek (DS-1271)
Stažení zásilky (DS-1274)
Trouble Debugging - BE část (DS-1289)
Trouble Debugging - FE část (DS-1290)
Úpravy šířky GUI formuláře pro editaci konfiguračního souboru (DS-1291)
Možnost definice pracovních míst a možnost definice jejich vazby na skupiny z LDAP/AD/IDM (DS-1292)
Umožnit úpravu konfigurace autentizační sekce z FE (DS-1293)
Soupis potřebné konfigurace Sejfa ve FN Motol (DS-1294)
Správa (zakládání, editace, mazání) kontaktů pracovních míst včetně vazby na systém oprávnění - BE část (DS-1295)
Správa (zakládání, editace, mazání) kontaktů pracovních míst včetně vazby na systém oprávnění - FE část (DS-1296)
KLON - Mazání uživatelů v CKTCH dle IDM (DS-1297)
Informovat uživatele o překročení limitů hned po výběru souborů ve WUI Sejfa (DS-1234)
Upravit překlady (DS-1272)
KLON - DrSejf - Implementace nové SMS brány smsbrana.cz (DS-1277)
Možnost odblokování zásilky bez příjemců - frontend (DS-1280)
Možnost odblokování zásilky bez příjemců - backend (DS-1281)
Volba pro automatické uložení kontaktu (DS-1312)
KLON - DrSejf - KlinikaJL nemožnost prokliku z portálu (DS-1340)

1.6. Odstraněné chyby

Oprava odeslání zásilky (DS-1307)
Sejf při otevírání odkazu z Portálu hlásí "Nemáte dostatečná oprávnění pro tuto stránku" (DS-1309)
Nefunguje stažení zásilky vytvořené přes QR kód, pokud ji stahuji ze stránky Přijaté zásilky (DS-1311)
Načítání kontaktů do Reduxu (DS-1313)
DrSejf printer - permission - login dialog not shown (DS-1325)
KLON - DrSejf - Nefunkční stažení DICOM dat skrze Sejfa pomocí "Stáhnout zásilku včetně DICOM prohlížeče" (DS-1339)
Timeout při odesílání velké zásilky ve FN Motol (DS-1341)
KLON - DrSejf - Nemožnost stáhnout a zobrazit v prohlížeči (DS-1344)
Anonymizace v detailu stahované zásilky (DS-1351)

2. MARIE PACS 24082912

Funkce:	MARIE WebVision
Verze:	24082912
Datum uvolnění:	29.08.2024

2.1. Změny a zlepšení

DW3: Používat DW3 i pro CD Viewer

DW3: Prohlížeč DICOM tagů zobrazující i privátní tagy

DW3: Akce na kontextové menu

DW3: Vylepšení funkcí CMPR / SMPR

DW3: Nástroj rotace

DW3: Přidat SNR hodnotu do měření ROI

INT: Integrace s RadPoint platform

AI: Integrace s Neurona

WEB: Možnost nastavení výchozího anonymizačního profilu pro různé operace

WEB: Sjednocení roli pro export

WEB: Vylepšení ergonomie GUI

WEB: Podpora založení nového pacienta

WEB: Changelogy pro klientskou konfiguraci

SYS: Servisní nástroj pro editaci dpgw.xml s integrovanou nápovědou

CFG: Start s minimalistickým dpgw.xml

PORTAL: Podpora přihlášení přes token externího sdílení studií

LIB: Aktualizace knihoven:

- dcm4che 5.29.2 -> 5.32.0

- jetty 11.0.20 -> 11.0.22

- slf4j 2012 -> 2.0.13

- lombok 1.18.30 -> 1.18.34

- commons-net 3.9.0 -> 3.11.1

- gson 2.10.1 -> 2.11.0

- mybatis 3.5.15 -> 3.5.16

- liquibase 4.21.1 -> 4.28.0

- h2 2.2.224 -> 2.3.230



- commons-io 2.11.0 -> 2.16.1
- commons-codec 1.15 -> 1.17.1
- commons-email 1.5 -> 1.6.0
- guava 31.1.2 -> 33.2.1
- groovy 3.0.13 -> 3.0.22
- freemarker 2.3.32 -> 2.3.33
- azure-storage-blob 12.25.4 -> 12.26.1
- jSerialComm 2.9.3 -> 2.10.5
- cxf 3.5.7 -> 3.5.8
- bouncycastle 1.77 -> 1.78.1
- joml 1.10.5 -> 1.10.7
- zstd-jni 1.5.5-11 -> 1.5.6-3
- zxing 3.5.1 -> 3.5.3
- ipaddress 5.4.0 -> 5.5.0
- java-jwt 4.3.0 -> 4.4.0
- xmlutils 1.2.5 -> 1.2.7
- janino 3.1.10 -> 3.1.12
- kafka 3.6.1 -> 3.7.1
- ksqldb 7.6.0 -> 7.6.1

2.2. Odstraněné chyby

REPL: Pokud se updated_ts pacienta primárního a sekundárního serveru liší přesně o vteřinu, nedojde k jeho replikaci – BACKPORT

WEB: Nelze se přihlásit DPGW tokenem - BACKPORT

REPL: Plná replika HCF nezavírá HTTP klienta - BACKPORT

CORE: Souběh nad Principalem ve Storage/PacCounteru – BACKPORT

DW3: Měření občas neměří, pokud je ve snímku zobrazena overlay z PR

DW3: Inverze snímku nereflkuje společný windowing pro sérii - BACKPORT

WEB: Nezobrazení anonymizačních polí v dialogu pro přeposlání dat

WEB: Leak v ondemand licencích – BACKPORT

AUDIT: C-Move requesty přes DicomWeb rozhraní se neauditují

DCM: Nelze zobrazit snímek s nevalidním tagem Ref. Physician Name

LOG: Zkrácení logu z Display Validation

CORE: Při vytváření nového tenantu se kopíruje nastavení OU ze super PACu místo z default PACu

CORE: Nelze spustit nová instance DPGW, pokud je v PostgreSQL přeloženo pgmq, ale používá se SimpleMessaging a PGMQ rozšíření není v DB zapnuto

DCM: Pro čtení JPEG TS `1.2.840.10008.1.2.4.70` se změnil výchozí kodek na OpenCV

WEB: Nedeterministický start/ukončení HTTP servletů a filterů

DOSE: Chybné načtení tenantu v DoseReader service

DIGI: Nevalidní délka response při dotazu na konfiguraci Capture

RADPOINT: Chybějící DICOM charset pro PDF nálezy přijaté z Radpoint platformy

CORE: PGMQ messaging nově nevyužívá partitioning

CORE: Zpomalování odesílání zprávy při chybě v PGMQ consumerovi

DW3: Pomocí klávesnice nelze přeskočit na další snímek, pokud jsme v multiframe snímku

DW3: Prohlížeč nezobrazí snímky ani pracovní sadu při specifikce JSON konfiguraci

DW3: Nefunkční automatické odhlašování v případě povoleného ukládání stavu při autologoutu

DW3: Nefunkční ukládání stavu prohlížeče při autologoutu

RADPOINT: Modul Radpoint zpracovává zprávy pro všechny tenanty

DIGI: Nezobrazení dlouhého timeshift videa v prac. sadě

DIGI: Parsování času vytvoření videa u timeshift videí

DW3: Uvolňování paměti je příliš pomalé a uvolní více paměti než je třeba

DW3: Změna výchozí hodnoty parametru `data-loader:unload:when-avail-memory-below` z 1GB na 0B

DW3: Chybné renderování overlay snímku na ACPECT

RADPOINT: Nefunkční integrace s RadPointem

WEB: Při vypínání DPGW vrací servlety HTTP 200 přesto, že request neprovedou

WEB: Administrace - správa HCF - ACL - nezobrazí se všechna HCF

WEB: Nefunkční zobrazení dialogu pro správu OSD profilů

DW3: Nedostupné cMPR a sMPR

DW3: Chybějící uložení textové poznámky do privátního tagu

LIB: Nefunkční azure blob storage

DCM: U privátních tagů může spadnou počítání velikosti snímku na ClassCastException

WEB: Pomalé doptávání se na DAC ve vyhledávacím dialogu

DW3: Nepřejmenování záložky při otevření nového pacienta

DW3: Nedokonalá prahová segmentace

WEB: Vykreslení kontextového menu ve vyhledávacím dialogu mimo stránku

CORE: Changelogy konfigurace je nutné pouštět až po základní inicializaci DPGW

CORE: Storage - nelze upravit, pokud je plná

CORE: DPGW se nez inicializuje nad H2 databází

CLOUD: CloudpacsServer má chybnou groovy validaci

HL7SRV: Nefunkční need-client-auth na HL7 serveru
 REPORT: Oprava konfigurace Report Provideru
 REALAPI: Při dicomizaci se neuloží tag PatientOrientation
 UI: Chybné zobrazení stránky s konfigurací na mobilním zařízení
 UI: Chyba v konzoli při načtení xml editoru
 DW: V horním menu chybí ikonka pro měření úhlu spodní končetiny
 DW3: Problém s měřením úhlů na snímcích s asymetrickými rozměrem pixelu
 DW3: Chybné zobrazení overlay v případě nesedících rozměrů snímků a overlay
 BASE: Nezastavení DPGW, zůstane běžet vlákno SimpleMessageReducer
 DW3: Chybějící tooltipy na některá tlačítka v horním menu
 WEB: Rozbalování položek ve vyhledávacím dialogu při skrolování na dotekovém zařízení
 WEB: Provolávání z webové aplikace s Same-Site: Strict hlavičkou
 DW3: Při vytváření objemu ze série, která má pouze 2 localizer snímky dojde k chybě
 DW3: Při přidělení ondemand mammo licence nefungují hanging protokoly
 WEB: IDM logout při vypnutém OAuth2
 WEB: Nevalidní hlášení o nepodporovaném prohlížeči
 DW3: Oprava prioritního výběru virtuálních sérií v hanging protokolu
 DW3: Nepřejmenování záložky při otevření nového pacienta - BACKPORT

Funkce:	MARIE Portal
Verze:	24082912
Datum uvolnění:	29.08.2024

2.3. Změny a zlepšení

Odesílání snímku - výchozí ePACS (MAPO-3565)
 Rozšíření prac. seznamů o historii prohlížení (MAPO-3500)
 Získání dokumentu z ELDAX (MAPO-3551)
 Nastavení priority výměnných sítí (MAPO-3566)
 Doplnění checkboxu do NCPEH formuláře (MAPO-3576)
 Zobrazení historie zobrazení vyšetření v prac. seznamu (MAPO-3501)
 Zapsání historie (MAPO-3502)
 Test DICOM importu (MAPO-3504)
 Test multimediálního importu (MAPO-3505)
 Zobrazení ikonek náhledu série a části těla (MAPO-3529)

Rozdílné barvy notifikací - sjednotit ano či ne? (MAPO-3532)

Tmavý mód - zviditelnit ikonku kalendáře u datumu narození (MAPO-3535)

Update balíčků (MAPO-3537)

Test importu přes token (MAPO-3541)

Test ovládacích prvků - login, menu, zmenšení levé lišty, loga, datum vydání (MAPO-3542)

TOTP nastavení v uživatelském profilu (MAPO-3543)

Grid - hook useMuiGrid rozdělit na komponentu a hook (MAPO-3544)

Doplnění atributu k typu dokumentu (MAPO-3552)

Přidání tlačítka pro stažení dokumentu z ELDAX (MAPO-3553)

Smažu snímek v Sérii - na časové ose se nesníží počet (MAPO-3557)

Průhledné pozadí header v Gridu (MAPO-3559)

KLON - mDEX - nálezy (MAPO-3560)

Doplnění nových error hlášek (MAPO-3561)

Levé menu (MAPO-3564)

Úprava formuláře pro editaci výměnné sítě (MAPO-3567)

Výchozí zobrazované sloupce v gridu vyšetření (MAPO-3569)

Sjednotit ikony (MAPO-3571)

Upravit chování otevírání náhledu (MAPO-3572)

Optimalizace detailu vyšetření (MAPO-3574)

Přidat nový atribut do formuláře nemocnic (MAPO-3575)

Přidání checkboxu do formuláře NCPEH (MAPO-3577)

Zobrazit vyšetření, kterých se statistika nálezů týká (MAPO-3578)

Rozšíření funkcionality tlačítka pro stažení dokumentu z ELDAX (MAPO-3580)

Zobrazení sloupce s nově vyčtenými atributy (MAPO-3581)

Úprava grafů pro upgrade balíčků (MAPO-3586)

KLON - Nápad vylepšení pracovní seznamy (MAPO-3110)

KLON - statistika podle štítků (MAPO-3267)

KLON - Možnost importu do existujícího vyšetření při provolání tokenem (MAPO-3493)

Vycentrovat logo v menu (MAPO-3587)

Nesedí pořadí štítků (MAPO-3599)

Rozjždění některých gridů (MAPO-3604)

Opravit UX reportů nálezů (MAPO-3614)

Odeslání vyšetření přes DRSEJF (MAPO-3617)

KLON - Hromadné přiřazení štítků (MAPO-3621)

Grid - rolování dat (MAPO-3622)

KLON - provolání token pro import - přesměrování (MAPO-3626)

Ošetřit výjimky v importu (MAPO-3627)

2.4. Odstraněné chyby

Statistiky nefungují (MAPO-3588)

Chyba při zpracování notifikací (MAPO-3596)

Import multimed - obrazové určení, nejde uložit (MAPO-3597)

Nelze upravovat uživatele (MAPO-3602)

Nelze upravovat uživatele (MAPO-3602)

Vyšetření se neotevře z notifikace (MAPO-3618)

Nelze upravovat žádosti (MAPO-3619)

Nedoplněné vyskakovací okno, špatná notifikace (MAPO-3620)

Import multimediálních - v gridu chybí název souboru (MAPO-3628)

Import multimediálních - Vyhledat žádanku - odkliknout žádanku - runtime error (MAPO-3629)

Funkce:	MARIE Dr.Sejf
Verze:	24082912
Datum uvolnění:	29.08.2024

2.5. Změny a zlepšení

KLON - Hromadný import adresáře kontaktů do DrSejf FNKV (DS-1186)

Virtuální tiskárna pro Dr. Sejf (DS-1196)

Správa oprávnění, limitů a dalšího nastavení v GUI - část 1 (DS-1259)

Umožnit vytváření zásilek bez definovaného odesílatele (DS-1198)

Odblokování uživatelské session po ztrátě accessTokenů - FE (DS-1200)

Správa pracovních míst a jejich mapování na uživatelské skupiny (DS-1214)

Monitoring používání unblock session API - FE (DS-1219)

Možnost zablokovat u konkrétního uživatele či IP adresy používání unblock session API (DS-1220)

Zrušení zásilky - BE (DS-1221)

Zrušení zásilky - provolání BE z C++ třídy (DS-1222)

Zrušení zásilky - promítnutí informace na FE (DS-1223)

Nahrazení závislosti na zranitelných knihovnách (DS-925)
E-maily o překročení limitů - prověřit množinu adresovaných uživatelů (DS-1188)
Implementace C++ třídy (DS-1197)
Upgrade npm balíčků na nejnovější verzi (DS-1224)
DICOMDIR včetně DICOM prohlížeče jako ISO soubor (DS-1123)
KLON - DrSejf - Možnost přihlášení jak jménem, tak mailem (DS-1153)
Možnost provozovat více domén na jedné instalaci - výběr správné domény do generovaných odkazů na základě lokalizace (DS-1155)
Historie zásilek (DS-1171)
CKTCH - Integrace stavu "Nedoručitelné" do spisové služby eSSL (DS-1184)
Prometheus monitoring - časové metriky (DS-1190)
Nové oprávnění MUST_CHANGE_PASSWORD - zpracování na FE (DS-1194)
KLON - Reset session (DS-1199)
Update vlajek států (pro telefonní čísla) (DS-1213)
Graficky více odlišit expirované zásilky (DS-1227)
Předvybraná telefonní předvolba podle jazyku GUI (DS-1228)
Podpora TCP u syslog appenderu (DS-1229)
Nová kategorie - Kopie Kategorie 1 s expirací zásilky 14 dní (DS-1230)
Doplnění chybějících překladů na frontendu (DS-1231)
Nová SMS brána - T-Mobile OMNI gate - včetně doručenek (DS-1232)

2.6. Odstraněné chyby

Mazání datumu pro výběr z PACS souborů (DS-1120)
Úprava formuláře pro registraci uživatele (DS-1147)
KLON - Přepínač anonymizace ndrží (DS-1168)
Nefunguje filtrace unblock session API requestů podle filtru rqlpAddressLike (DS-1233)
Nefunguje návrat zpět z vybraných stránek druhé úrovně (DS-1237)
Vykopírovat odkaz - chybné chování (DS-1238)
Nepřišla notifikace o zablokování zásilky (DS-1239)
Nevyskočila chybová hláška - žádost o změnu hesla u nově registrovaného (DS-1240)
Administrace-statistiky - nemám vidět výběr organizace (DS-1241)
MRSEJF - špatný email (DS-1258)
Kontrolu práv na upload stránku zařadit až po /api/decrypt-token (DS-1275)
Pokud vyberu více než 5 studií z PACS archivu, formulář pro vyber studii zmeni barvu (DS-1273)

3. MARIE PACS 24062514

Funkce:	MARIE WebVision
Verze:	24062514
Datum uvolnění:	25.06.2024

3.1. Změny a zlepšení

DW3: Možnost skrýt hraniční lokalizační čáry

CORE: Updatovací script umožňuje specifikovat zdrojový i cílový adresář

WEB: Při exportu dat s deidentifikací zobrazit informaci s novými údaji o pacientovi

DW3: Možnost konfigurace prohlížeče do minimalistické verze

DW3: Akce na kontextové menu

Nové role:

- VIEWER_LITE (Admin) - uživatel dostane verzi prohlížeče s minimální funkcionalitou bez ohledu na jeho další role

- VIEWER_STANDARD (Admin, Locadmin, DicompassW) - uživatel dostane prohlížeč s podporou plné funkcionality dostupné podle jeho rolí

Aktualizace knihoven:

- logback 1.5.3 -> 1.5.6

- postgresql 42.7.2 -> 42.7.3

- azure-storage-blob 12.25.3 -> 12.25.4

VIDEOCONF: Volitelné parametry volání jsSIP knihovny

MODULE: Přepis do modulů (AI, Cert. autorita, správa klientských certifikátů, DEX)

DW3: Tlačítko "Všechny studie pacienta" v horním menu

DW3: Přidání podpory obrazového zobrazení pro SOP class X-Ray 3D Angiographic Image Storage

DW3: Možnost skrýt časovou osu na všech monitorech najednou

DW3: Podpora CMPR/SMPR

VIDEOCONF: Nový modul Video Conference

VIDEOMGMT: Správa konfigurace video managementu

DCM: Groovy pro mapování DB atributů žádanky na odpovědi MWL C-Findu

WEB: Seznam typů auditních zpráv v UI

WEB: Lokalizace názvů study cache

WEB: Hromadné akce v dočasných datech

WEB: Přidání názvu pracovního seznamu do hlášky potvrzující přidání studie do seznamu

WEB: Upravit dialog pro vyhledávání žádanek - povinná pole
WEB: Přidání klávesové zkratky pro často používané stránky konfigurace
WEB: Konfigurovatelný prefix pro sdílené odkazy na studie
WEB: Nový skin pro mDEX schránky
API: Api pro zjištění seznamu studií pacienta
DIGI: Úpravy v komunikace přes postMessage mezi DW a Digitalizací
DIGI: Pracovní sada - vylepšený výběr snímků a videí
DIGI: Videomanagement - nový driver pro videohub BlackMagic
CORE: Předělání služby IntegrityCheck (paměťová náročnost, dlouhé transakce)
CORE: Automatické stahování manuálů do instalace
CORE: Issue Splnění legislativních požadavků značení
CORE: Nová role `REPORTS` - uživatel může získat a zobrazit si reporty/nálezy ke studiím

3.2. Odstraněné chyby

REPL: Pokud se updated_ts pacienta primárního a sekundárního serveru liší přesně o vteřinu, nedojde k jeho replikaci – BACKPORT
WEB: Nelze se přihlásit DPGW tokenem - BACKPORT
REPL: Plná replika HCF nezavírá HTTP klienta - BACKPORT
CORE: Souběh nad Principalem ve Storage/PacCounteru – BACKPORT
DW3: Inverze snímku nereflktuje společný windowing pro sérii - BACKPORT
WEB: Leak v ondemand licencích - BACKPORT
DEX: Oprava souběhu při dohledávání ctrl serveru – BACKPORT
CORE: Při vytváření nového tenantu se kopíruje nastavení OU ze super PACu místo z default PACu – BACKPORT
WEB: Nedeterministický start/ukončení HTTP servletů a filterů - BACKPORT
DOSE: Chybné načtení tenantu v DoseReader service - BACKPORT
DIGI: Nevalidní délka response při dotazu na konfiguraci Capture – BACKPORT
DW3: Nefunkční automatické odhlašování v případě povoleného ukládání stavu při autologoutu - BACKPORT
DW3: Prohlížeč nezobrazí snímky ani pracovní sadu při specifikce JSON konfiguraci – BACKPORT
DW3: Chybné renderování overlay snímku na ACPECT - BACKPORT
DW3: Uvolňování paměti je příliš pomalé a uvolní více paměti než je třeba - BACKPORT
DIGI: Parsování času vytvoření videa u timeshift videí - BACKPORT
DIGI: Nezobrazení dlouhého timeshift videa v prac. sadě – BACKPORT
WEB: Při vypínání DPGW vrací servlety HTTP 200 přesto, že request neprovedou – BACKPORT
DW3: Oprava prioritního výběru virtuálních sérií v hanging protokolu

DW3: Nepřejmenování záložky při otevření nového pacienta – BACKPORT

DCM: Na MWL C-Find nejsou uplatňovány limity na počet vrácených záznamů

PUBLISHER: Nesmazané adresáře po vypalění úlohy – BACKPORT

DW3: Nedokonalá prahová segmentace

WEB: Sdílecí odkazy - nesrovnalost v malých a velkých písmenech

DW3: Problém s měřením úhlů na snímcích s asymetrickými rozměrem pixelu - BACKPORT

DW3: Chybné zobrazení overlay v případě nesedících rozměrů snímků a overlay – BACKPORT

CORE: Nefunkční správa registrů z příkazové řádky

DIGI: Chybějící skrytí tlačítka videomatice

DW: Při odmazání série vymazat i virtuální série s touto sérií spojené

CMD: Oprava aktualizacího skriptu pro digi konfiguraci

WEB: Zrušení cachování login portálu

DIGI: Pamatovat si pacienta vybraného z WL i po odhlášení

DCM: Optimalizace spotřeby paměti při práci s daty s privátními tagy

DW3: Občasné nepřekreslení OSD popisků

REALAPI: Neuklizené soubory v tempu po exportu dat

HL7SRV: Memory leak při zpracování groovy výrazů v HL7 terseru

WEB: Deadlock při ukládání/získávání dat z DW cache

DW3: Chybná detekce multiframe při použití jiného PACSu než DPGW

WEB: Nenabídnutí stažení rozšíření do prohlížeče

WEB: Při odebrání rolí při vyčerpání licencí se to UI dozví příliš pozdě

DIGI: Štítky - chybějící ikona u instance

WEB: Selhání uzavření SSE spojení

WEB: V dialogu o nedostupných ondemand licencích se ukazují uživatelé za všech tenantů

WEB: Nefunkční monitoring servlety nad HCFRegistry

SHARE: Uživatelé externího sdílení nedostávají VIEWER_STANDARD roli

DW3: Chybný export multiframe snímků

DCM: Chybné chování lastname-heuristics

ROUTE: Oprava dlouhé transakce

CLOUD: Poskytovat dočasně CPCON i na cloudpacsu

CORE: Chyba inicializace cloudboxu

CORE: Nefunkční lang-override

DCM: Nesnažit se parsovat DICOM autentizační token, pokud dicoma autentizace není povolena

DCM: Při převěšování jsou k přepisu nabízeny i nesouvisející tagy

WEB: V tmavém režimu je kalendář velmi špatně čitelný

DW3: Chybné chování nástroje pro oknění na PET a NM modalitách

DW3: Měření volné vzdálenosti nelze ukončit, pokud je na pravém nebo prostředním tlačítku

DW3: Synchronizace maximalizace layoutu přes DWShare

DW3: Při přetažení vyšetření z časové osy zobrazit informaci o načítání

CORE: Dlouhé transakce v mazacích službác

CORE: Chyba současné modifikace při přihlášení entity

WEB: Oprava NPE v DomainListServletu při requestu z login portálu

DIGI: Při synchronizaci s Capture brát v úvahu nezpracované záznamy

WEB: Sdíleci odkazy nefungují při vytváření z DW, když studie není v lokálním archivu

WEB: Vyhledávací dialog žádanek - tlačítko reset rozbije formulář

CORE: Nefunkční updatovací script pro AI

CORE: Nefunkční config validator přes dpwg.sh

DCM: Sjednocení volání dcmout-postprocess scriptu

DW3: Nepropsání změny tématu do DW po přihlášení přes login portál

DW3: Nefunkční klávesová zkratka nad objemy

CLOUD: Nefunkční generování provolávacího klíče pro CPCON

CLOUD: Generování provolávacího klíče pro CPCON neumožňuje zadat skin a portal server

DEXCtrlsrv: Při vytvoření HCF k PacsAccountu se nepřidá certifikát

CORE: Oprava migrace storage. Nepokoušet se jeden SO migrovat vícekrát

ESB: Nefunkční odesílání notifikací na ESB

COMMON: Nedržet transakci při běhu external processing

CORE: LicenseModules nereloaduje konfiguraci po reloadu licence s lic. serveru

CORE: Oprava dlouhých transakcí při StorageMigration a LayerMigration

HOOD: Oprava NPE při chybějícím IssuerOfPID

DIGI: WebRTC - nefunkční živý náhled na vyšetření

DIGI: Zapamatovaná stanice při zavření prohlížeče

DIGI: Chybějící povinné DICOM tagy

WEB: Nefunkční filtrování SR maker

WEB: Při provolávání s modalitou, která není uvedena v UI nedojde k zapsání hodnoty do políčka Ostatní modality

WEB: Nefunkční změna rozvržení vyhledávacího dialogu

WEB: Špatný focus při otevření snímku v prohlížeči z okna, kde je samostatný archiv

DW3: Posun mezi jednotlivými frames

DW3: Chybějící kurzor nástroje "interaktivní změna tloušťky řezu"

DW: Neaktualizovaný seznam HP pro uživatele/org. jednotku

Funkce:	MARIE Portal
Verze:	24062514
Datum uvolnění:	25.06.2024

3.3. Změny a zlepšení

Vyhledávací formulář neakceptuje defaultní nastavení archivů (MAPO-3526)

Chování ikon časové osy zdrav. dokumentace (MAPO-3527)

Optimalizace vzhledu a funkčnosti stránky importu multimediálních dat (MAPO-3528)

ZD - časová osa - tmavý mód - není vidět dokumenty (MAPO-3530)

Správa číselníku nemocnic (MAPO-3547)

Stránka se statistikou nálezů (MAPO-3548)

MW - vytvořit vyšetření - přidám DICOM, provede se jen import (MAPO-3554)

Sjednotit názvy Sledovat x Zobrazit DÁVKU (MAPO-3558)

3.4. Odstraněné chyby

Nelze přidat do pracovního seznamu z detailu vyšetření (MAPO-3533)

Import multimediálních - Vyšetření - není doplněn archiv (MAPO-3538)

MW - vytvořit vyšetření - je vyplněna modalita, jako kdyby nebyla (MAPO-3539)

KLON - Odeslání série přes výměnnou síť (MAPO-3568)

Funkce:	MARIE Dr.Sejf
Verze:	24062514
Datum uvolnění:	25.06.2024

3.5. Změny a zlepšení

Úpravy pro MDR (DS-992)

Aktualizace smluvních podmínek (DS-1144)

Cookies - úprava lišty (okna) (DS-1165)

GDPR - Úprava registračního okna (DS-1169)

Nová stránka - Zásady použití cookies (DS-1170)
CKTCH - podpora pro integraci s MetaVision (DS-1173)
KLON - Validace konfigu (DS-1181)
KLON - Dr.Sejf - problém s přílohami z eSSL (DS-1185)
KLON - možnost znovu odeslat email (DS-1031)
KLON - Validace konfigu (DS-1146)
KLON - CKTCH - Zpráva do emailu příjemce (DS-1149)
Změna workflow pro odblokování zásilky - vykreslení seznamu zásilek (DS-1150)
Nová pravidla pro odblokování příjemce (DS-1151)
Změna volání servletu /api/unblock-transfer-recipient (DS-1152)
Logovací obrazovka - štítek a uživatelská příručka (DS-1154)
Při rozkliknutí verifikačního odkazu z emailu předvyplnit email pro přihlášení (DS-1156)
Při jiném než defaultním brandingů se nejprve vykresluje defaultní branding (DS-1159)
CKTCH - podpora pro integraci s MetaVision (DS-1161)
KLON- Překročení limitů - info o levelu (DS-1162)
Možnost skrýt v patičce cookies a uživatelský manuál (DS-1183)
KLON - Dr.Sejf - Kontakty (DS-1191)

3.6. Odstraněné chyby

Oprava buildu při stazeni cisteho repozitare (DS-1193)
KLON - CKTCH - DrSejf, odesílání bez tel. čísla odesílajícího (DS-1225)
KLON - Testování napojení ldap vs drsejf FNM (DS-1226)

4. MARIE PACS 24013112

Funkce:	MARIE WebVision
Verze:	24013112
Datum uvolnění:	31.01.2024

4.1. Změny a zlepšení

ESB: Možnost provozovat dotahování nálezů přes ESB bez služby is-reports

WEB: Podpora provolání podle StudyDate a Modality

DW3: Zvýraznění aktivní stage HP v horním menu

DW3: Klávesová zkratka pro přeskokování na předchozí/následující HP

DW3: Možnost invertovat stacking

DW3: Přidání přepínač pro vypnutí měření vzálenosti pomocí klikání jednotlivých bodů

DW3: Skrytí přesýpacích hodin znázorňující probíhající přepočet ROI

DW3: Podpora reakce na změnu počtu snímků v serii (př.: sledování studie)

DW3: Automatické pozicování hodnoty měření pro plochy na mammo snímcích

DIGI: Možnost zobrazit náhled snímku při mazání

WEB: Nastavitelná velikost threadpoolu pro webserver a možnost jeho sledování

WEB: Zobrazení textu "Bezplatný vzorek"

DW3: Možnost rozbalení/sbalení studie ve WS

DW3: Zobrazení nastavení pracovní sady, pokud uživatel má roli DISABLE_USER_CONFIG_SAVE

DW3: Přidání ws:visible pro možnost skryt/zobrazit ve výchozím stavu všechny pracovní sady

DW3: Nahrazení funkce uložit stav prohlížeče za akci uložit layout

DW3: Možnost nastavit výraznější datum studie v pracovní sadě

DW3: Vlastní nastavení velikosti textu pro hodnoty měření

DW3: Možnost zvolit rozbalení pouze zobrazené studie v contextovém menu nad aktivním panelem

DW3: Možnost blokovat použití orientace na snímcích určitého typu

DW3: Oddělená konfigurace pro nastavení velikosti fontu SR

DW3: Oddělená konfigurace pro resetování rozložení panelů při otevírání vyšetření z časové osy

DW3: Přepínání výchozích nástrojů podle modality aktivního panelu

DW3: Klávesová zkratka pro posun na začátek/konec pracovní sady

DW3: Vizuální gradient, pokud se dá v pracovní sadě posouvat

DW3: Konfigurace sloupečků ve flexibilní pracovní sadě

DW3: Možnost nastavení výchozích hodnot pracovní sady pro všechna okna

DW3: Možnost resetovat výchozí nástroje při změně aktivního panelu, možnost zapnout reset nástrojů podle aktivního - Akce "Vybrat výchozí nástroje" kl. zkratka ESC

DW3: Možnost obarvit modality na časové ose různou barvou

WEB: Možnost přidat vlastní HTTP hlavičky pro SSE servlety

DW3: Klávesová zkratka pro přepínání aktivního PR

DW3: Možnost konfigurace délky pravítka

DW3: Změna ikonek A, L, I na C, S, T pro MPR

WEB: Zakázání překládání webu google translatorem

DW3: Zjednodušená možnost hlášení chyby

DW3: Skrytí tlačítek s duplicitní orientací pro výběr projekce

DW3: Možnost přepínání Waveform multiplexu

DW3: Podpora časového procházení série – perfuze

DW3: Lepší zvýraznění vybrané série v pracovní sadě

4.2. Odstraněné chyby

DW3: Oprava pomalého stackingu na neprimárním okně

DW3: Oprava nesmyslných pozic po resetu při synchronizaci objemů

REPL: Nezakládat Master Eventy při propagování mazání z konfigurační repliky na lokalitě

DW3: Oprava neresetování výchozích nástrojů s vyčistěním pracovní sady

DW3: Oprava ikonky nástroje u kurzoru při dynamickém nastavení nástrojů

DW3: Oprava nefunkčního exportu měření plochy a měření z neprimárního okna

DW3: Oprava chybějícího tooltipu pro akce v rámci konfigurace horního/kontextového menu

DW3: Oprava konfliktu transformací a HP na více monitorech u MG

DW3: Oprava neaktualizace skupin ECG

DW3: Otáčení lokalizačních čar pouze ze stejného objemu

DW3: Probíhající rotace objemu neovlivňuje synchronizované panely

DW3: Oprava požadované role pro aktivaci Spatial Registration

DIGI: Oprava řazení položek pracovní sady při zobrazeném scrollbaru

DIGI: Nefunkční klávesová zkratka DEL pro odmáznutí aktivní položky z pracovní sady

WEB: Neposílat z UI v PatientSex po dicomu hvězdičku, pokud hledáme všechna pohlaví

DW3: Zatuhnutí panelu a prac. sady pokud StudyWatcher změní počet snímků v sérii

WEB: Aplikovat URLDecode na důvěryhodné provolávání

CORE: Oprava NPE při startu DPGW po chybném commitu z předchozí verze

DCM: Při Storage Commitmentu čekat na odpověď modality před uzavřením asociace

CORE: Oprava NPE při načítání UDI z utilit příkazového řádku

DW3: Nevýrazná ikona zobrazených sérií v pracovní sadě

DW: Chyba v hanging protokolech při současném použití splitterů

WEB: Oprava nevrácení domény a studyUid při updatu žádanky

DW3: Oprava nefunkčního vypnutí automatického přehrávání

DW3: Zakázání funkce nastavení křivek EKG, pokud v aktivním panelu není EKG

DW3: Oprava nevhodné citlivosti windowingu na přiloženém CT mozku

DW3: Oprava kurzoru, který překrývá text měření vzdálenosti

DW3: Oprava dnd ve FF

DW3: Chybná tloušťka řezu při vytváření série z MPR

DW3: Některé akce volané z kl. zkratky nedostávají informaci o aktuálně zobrazeném snímku

REPL: Oprava NPE, pokud se při C-Move na lokalitu nepovede navázat asociace na cílovou AE

DW3: Oprava zahájení měření, pokud je vybrán nástroj měření a klikem se aktivuje jiný panel

DW3: Oprava schování časové osy při fixním režimu; Oprava nerefektování \$.timeline:initMode

DW3: Opravena rotace snímku vždy kolem středu zobrazení s více panely

CORE: Oprava pádu při souběhu dvou instancí DPGW a importu zip souboru

DW3: Oprava rozsahu renderování pro waveform snímky s jinou jednotkou než volty na ose Y

DW3: Nenačtení výchozích nástrojů při vypnuté aktualizaci nástrojů při změně referenční studie nebo aktivního panelu

DW3: Nezajetí panelu nástrojů při vyjetí myši mimo okno

DW3: Zmizení SR z panelu při přetažení výšetření z pracovní sady

DW3: Zamrznutí prohlížeče na méně výkonných stanicích při otevírání a procházení velkých sérií

DW3: Možnost ukončit dlouhé načítání pracovní sady a zobrazení snímků

DW3: Občasné chybné zarovnání snímků při změně layoutu

DW3: Oprava zobrazení fixní časové osy přes panel při maximalizaci panelu

DW3: Nezobrazení indikátoru zobrazených vyšetření v časové ose

DW3: Boční rekonstrukce fúze započítávají voxelSize

DW3: Rotace snímku vždy kolem středu zobrazení

DW3: Přepínač pro schování objemových localizer lines na aktivním panelu

DW3: Nefunkční schování/otevření přehrávače přes akci v horním menu

PUBLISHER: Pozdržení zápisu JDF souboru po vytvoření adresáře s daty k pálení

STORAGECHECK: Kontrola integrity storage ignoruje parametr storageGroups

WEB: Oprava získání seznamu administrativních účtů v PacInfo servletu

NOTIFY: Notifikace posílané přes HTTP nepředávají autentizaci

DW3: Oprava nepřeloženého názvu splitteru v kontextovém menu pracovní sady

DW3: Oprava ignorování objemu v prvním panelu pro funkci "Vyplnit prázdné panely"

DW3: Nástroj lupa by neignoruje pozadí u MG snímků

DW3: Funkční klávesové zkratky pro přepínání pohledu objemu

DW3: Doplněné tlačítko pro změnu tloušťky řezu pro všechny relevantní projekce

DW3: Oprava vizuálního cuknutí bočního slideru při stackingu mezi nenačtené instance

DW3: Oprava přeskočení z jednoho vyšetření do dalšího pomocí stackingu přes kolečko myši

DW3: Přidána podpora chybějící funkce resetLayoutOnWSOpen

DW3: Přetažení/double-click z časové osy neaktualizuje studii, pokud je v pracovní sadě

DW3: Oprava neskrytí kurzoru myši při použití nástroje lupa

DW: Ignorovat instance splitters

DW3: Oprava špatného překladu v dialogu pro uložení měření

LIC: ONDEMAND licence MAMMO a WAVEFORMS se nelicencují podle modality, ale SOPClass snímku

DW3: Nefunkční nastavení velikosti a barvy OSD popisku

DW3: Optimalizace vykreslování náhledu videa při manuální změně pozice v přehrávači

DW3: Lokalizace všech informací v tooltipu nad časovou osou

DW3: Problíknutí při synchronizaci windowingu nad dynamickým MR

DW3: Synchronizace transformací a windowingu mezi sérií a objemem - pouze jedna série se stejnou modalitou

DW3: Oprava chybějící konfigurace na vypnutí maximalizace panelu při double-clicku

DW3: Oprava exportu/odesílání snímků z virt. série

WEB: Oprava nevybrání archivů při prvním přechodu ze záložky "Digitalizace" do záložky "Archivy"

DCM: Ořezávání Req/Ref Physician na 64 znaků při ukládání do DB

CORE: ONDEMAND licence nefungují per PacsAccount

DW3: Oprava špatného chování skrývání/zobrazování skupin v panelu nástrojů s více okny (#2193)

DW3: Oprava prvotního nenačtení panelů z HP, které mají v podmínce automaticky rozdělenou sérii

DW3: Oprava zobrazení okrajů LL u sérií, které v průběhu mění orientaci snímků

DW3: Není možné skrýt 3D kurzor

DW3: Chybné renderování OSD "Starší/novější" v pozici na střed

DW3: Oprava pomalého double-clicku u nástrojů

DW3: Doplnění chybějících popisku pro akce v pracovní sadě

DW3: Nefunkční přeposílání instance z pracovní sady

DW3: Opraveno vícenásobné přepínání synchronizovatelnosti panelu

DW3: Včasná detekce rozdílné orientace u synchronizující série

WEB: Oprava zobrazení statistik, pokud má pacs account nastavený maximální limit počtu otevřených studií na 0

WEB: Filtrování auditu podle Pacs Accountu

DCM: Na C-Find proxy slučovat štítky stejných studií

DW3: Oprava nenačtení vyšetření při minimalizovaném/překrytém okně prohlížeče

Funkce:	MARIE Portal
Verze:	24013112
Datum uvolnění:	31.01.2024

4.3. Změny a zlepšení

Rozšíření práv o položku Mazání sérií vyšetření (MAPO-3121)

Úprava chování zvolených archivů (MAPO-3138)

Úprava kompaktního zobrazení pro mobilní zařízení (MAPO-3149)

Úprava chování výukového portálu (MAPO-3173)

Přidána podpora výměnné sítě mDEX (MAPO-3159)

Dynamické načítání ikon pro jednotlivé stavy vyšetření (MAPO-3142)

GDPR – možnost anonymizace uživatelů po ukončení pracovního poměru (MAPO-3142)

Vylepšen výběr štítků (MAPO-3147)

Možnost zrušit zobrazování náhledů sérií ve výukovém portálu (MAPO-3225)

Rozšíření funkcionality exportu komentářů do NIS (MAPO-3265)

4.4. Odstraněné chyby

Přesun do pracovního seznamu z detailu vyšetření neresetuje dříve zvolené seznamy (MAPO-3092)

Oprava pacienta – není k dispozici tlačítko Uložit (MAPO-3113)

Oprava chování notifikací u funkce Oprava pacienta (MAPO-3106)

Rozdíly v zobrazování náhledů sérií (MAPO-3105)

Oprava chování okna pro výběr výchozího prohlížeče (MAPO-3137)

Nemožnost odeslání vyšetření s nálezem (MAPO-3134)

Neaktivní přesun vyšetření do koše (MAPO-3136)

Výběr štítků nefunguje ve všech případech (MAPO-3179)

Oprava funkce Import DICOM při absenci data narození (MAPO-3067)

Oprava MWL ve stavu NEW (MAPO-3098)

Nemožnost uložení štítku (MAPO-3050)

Oprava chování štítků zdravotnického prostředku (MAPO-3213)

Nemožnost uložit přílohu s dlouhým názvem (MAPO-3227)

Nemožnost uložit změny v uživatelském profilu (MAPO-3224)

Výukový portál – oprava zobrazení výsledků testu (MAPO-3254)

5. MARIE PACS 23121410

Funkce:	MARIE Dr.Sejf
Verze:	23121410
Datum uvolnění:	14.12.2023

5.1. Změny a zlepšení

Usnadněn proces odblokování zásilky (DS-1150, DS-1152)

Přidána aplikace pro validaci konfiguračních souborů (DS-1146)

Přidána možnost povinně zadávané poznámky k přenosu (DS-1149)

Rozšířeno množství informací v e-mailech o překročení zakoupených limitů (DS-1162)

Přidán štítek zdravotnické dokumentace a uživatelská příručka (DS-1154)

Verifikační URL nově obsahuje informaci o uživateli, pro kterého je verifikace určena (DS-1156)

Nová stránka pro detailní informace o používání cookies (DS-1170)

Možnost znovu odeslat e-mailovou zprávu pro příjemce (DS-1031)

6. MARIE PACS 23101312

Funkce:	MARIE WebVision
Verze:	23101312
Datum uvolnění:	13.10.2023

6.1. Změny a zlepšení

DW3: Podpora SOPClass CardiacElectrophysiologyWaveformStorage

DW:3 Zvýraznění sérií vytvořených rozdělením série v pracovní sadě

DW3: Přepínač pro měření podle pozice objemu

DW3: Zpřístupnění fúzí a segmentací

DW3: Ignorování LOCALIZER snímků pro načítání objemů

DW3: Složitě zobrazení třípanelového MPR a MIP

DW3: Málo výrazný text na časové ose

WEB: Filtrování cílů výměnných sítí podle státu

DEX: Lepší logování komunikace s kontrolním serverem

DW3: Transformace zobrazení seskupovat podle původního rozměru snímku

DEX: Podpora calling a called AETu v HCF selfreportingu

CORE: Audit editace snímků

CORE: Podpora sdílených účtů uživatele na cloudpacsu

DIGI: Provolání změny id pacienta do archivu

DCM: Plugin pro validaci konzistence dat proti centru

WEB: Podpora logování statistik využití prohlížeče, zrušení browser logu

WEB: Předání informací do prohlížeče pro statistiky

WEB: Možnost resizu prohlížeče při zobrazení dialogu "Všechny studie pacienta"

WEB: Možnost zobrazit/skrýt nedostupné skupiny rolí ve správě uživatelů

CMD: Podpora "layers" u cmdline utility pro správu úložišť

CMD: Podpora pro generování DPGW provolávacích tokenů přes dpgw.sh

DW3: Správa štítků studie

DW3: Podpora statistik využití prohlížeče

DW3: Nástroj pro manuální nastavení pozice bradavky

DW3: Možnost nastavit rychlost přehrávání pro všechny přehrávače v dané studii

6.2. Odstraněné chyby

CORE: Zavírání HTTP klienta při odesílání notifikací

DW3: Oprava načtení prohlížeče s 3+ okny

DW3: Oprava několika akcí, které se provolávaly ze sekundárního okna na primární

DW3: Oprava neaktualizace pravitka při kalibraci měření

DW3: Oprava provolávání klávesových zkratk do prohlížeče při přepnutí do profilu pro anotace/jasová okna

DW3: Oprava ikonky sledování stavu studie na sekundárních oknech

DW3: Oprava funkce vyplnit prázdné panely pro \$.fop:mode="legacy"

DW3: Oprava scrollování v záložkách, přidání vyšetření do nové záložky

DW3: Oprava prohození posunu ECG pomocí šipek

DW3: Oprava funkce "Smazat všechna měření z aktuálního sezení"

DW3: Nefunkční ukládání konfigurace ze sekundárních oken

DW3: Zobrazení rekonstrukcí není narušováno automatickou synchronizací

DW3: Oprava fixní tolerance pro renderování 3D kurzoru

DW3: Přidání chybějícího popisu sloupčku pro levé a pravé tlačítko v dialogu pro konfiguraci nástrojů

DW3: Oprava nefunkčního mezerníku v prohlížeči DICOM tagů

DW3: VolumeStack reflektuje pozici po vnější změně

DW3: Vypnutí automatické synchronizace pro série obsahující snímky na stejných pozicích

DW3: Zobrazení pozice 3D kurzoru v MPR a Fusion painterech

DW3: Zobrazení ikonky nástroje při kreslení segmentací

DW3: Opravené načítání stavu s fúzemi

WEB: Oprava nezobrazení modulu "Prohlížeč" v konfiguraci klávesových zkratk

DIGI: Oprava chyby nepodporované API pro novější verzi Capture

WEB: Oprava stavu ikonky pro fullscreen v konfiguraci monitorů

DW3: Upozornění uživatele pokud se snaží tisknout větší množství snímků

DW3: Oprava neukončení rozpracovaného měření po stisknutí klávesové zkratky pro vymazání všech měření

DW3: Oprava vysoké citlivosti windowingu pro snímky z modalit značky Philips

DW3: Oprava chybného renderování MR snímku na Intel HD Graphics 400

DW3: Oprava rozdílné citlivosti windowingu mezi sérií a MPR(ze stejné série)

DW3: Oprava odloadování objemu z pracovní sady

DW3: Oprava nefunkčního měření density a ROI nad objemy

DW3: Oprava neaktualizace ROI u objemů a sdíleného měření přes celou sérii

DW3: Oprava pomalého odebrání položky z pracovní sady, pokud jsou načtené tisíce snímků

DW3: Oprava zobrazení DSA tlačítka v přehrávači pro multiframy

DW3: Oprava chybného windowingu u objemů obsahujících Rescale

DW3: Oprava nefunkčního načtení/uložení layoutu přes akci "Uložit konfiguraci prohlížeče"

DW3: Chybný PixelGetter pod režimem WEBGL1_HALF_FLOAT

DW3: Měření nad objemy a fúzemí je oddělené v různých pohledech

DW3: Oprava nezobrazení dialogu s výběrem projekce na druhém monitoru

DW3: Oprava textového náhledu v pracovní sadě pro flexibilní mód

LIB: Oprava zranitelnosti Jetty CVE-2023-44487

DW3: Oprava nepřeloženého názvu splitteru v kontextovém menu pracovní sady

DW3: Prohození klávesových zkratk y/z

DW3: Nezobrazování tlačítka "schovat localizer lines pro rekonstrukce", pokud je zbytečné

DW3: Oprava překrytí přehrávače videa a série

DW3: Oprava chybějící akce "Odeslat data" z pracovní sady pro PATIENT/STUDY level

DW3: Oprava odebrání série z pracovní sady, ke které existuje objem

DW3: Oprava špatného výběru série při přetažení nenačtené studie z časové osy do panelu

DW3: Oprava nefunkčního přetažení série do panelu jiného monitoru, kde je zobrazeno PDF

DW3: Přepínač pro lokalizační čáry neovlivňuje lokalizační čáry rekonstrukcí

CMD: Oprava NPE v nástroji pro generování autentizačních tokenů

WEB: Oprava filtrování HCF v záložce HCF ACL

DEX: Oprava vyčerpání vláken kontrolního serveru

DW: Zakázání shutteru ve výchozím nastavení v DW konfiguraci

WEB: DICOM dotazy v DW servletech dělat mimo transakci

DW3: Zarovnání MG při nedetekovaných bradavkách

DW2: Oprava resetu výchozích nástrojů na více oknech

DW3: Nefunkční odeslání instance z pracovní sady

DW3: Vylepšení detekce ořezu prsu pro mamografii

DW3: Oprava nefunkčního vlastního tlačítka pro otevření url adresy s propsáním parametrů

DW3: Oprava nezobrazení videa ve špatné SOP Class

DW3: Oprava špatné velikosti dialogu klávesových zkratk pro font size 3 a 4

DW3: Oprava nepropsání konfigurace velikosti náhledu pro flexibilní layout pracovní sady

WEB: Escapovat hodnoty z provolávacího tokenu

WEB: Oprava načtení štítků a příznaků při otevření oblíbeného filtru ve vyhledávacím dialogu

DW3: Oprava nefukčního nastavení ignoredSOPClasses pro pracovní sadu

DW3: Nejde změnit rychlost v průběhu přehrávání

DW3: Sjednocení chování přehrávače sérií s MF pro přeskokování na další sérii v průběhu přehrávání
DW3: Sjednocení chování některých klávesových zkratk se staší verzí DW

7. MARIE PACS 23090713

Funkce:	MARIE WebVision
Verze:	23090713
Datum uvolnění:	07.09.2023

7.1. Změny a zlepšení

DCM: Podpora konfigurace šifer pro TLS DICOM komunikaci

DW: Možnost nastavit verzi DW pomocí Role Group uživatele

AUTODEL: Podpora promazávání po jednotlivých Pacs Accountech

DW: Vylepšené zobrazení pracovní sady, možnost zajíždění panelu

DW: Export hodnot měření do systémů třetí strany

DW: Uživatelsky volitelné dělení sérií

DW: Vizualní rozlišení primárního zdroje dat na časové ose

DW: Úprava chování kurzoru nástroje

DW: Přidána možnost nástrojových panelů

DW: Nástrojový panel mammografie

DW: Skrytí všech postranních panelů a menu na všech monitorech klávesovou zkratkou

DW: Úprava chování ikony manuální synchronizace

DW: Možnost přeskočení video přehrávání o definovaný úsek

DW: Podpora měření na Doppler US: integral, VTI, PHT

DW: Rozšíření funkcionality klíčových snímků

DW, CORE: Podpora series-level HP matcheru pro tag SeriesDescription pro virtuální série

DW: Nástroj pro rychlé vyhledání libovolné akce (search box)

DW: Vizualizace mapování klávesových zkratk, víceúrovňové mapování klávesnice

DW: Optimalizace rychlosti načítání i renderování snímků

DW: Redesign ikon a UI

DW: Opravy chybně pořízených snímků

DW: Nástroje pro získávání snímků a částí videa

DW: Overlay pro exporty z digitalizace

UI: Tlačítko "Přidat a zobrazit" v dialogu s výsledkem DICOM importu

CORE: Jemnější granularita rolí pro StudyFlags

CORE: Při vytváření nového Pacs Accountu nakopírovat i DW JSON config z default PACu
CORE: Umožnit identifikace PACu pomocí certifikátu na DICOM TLS
CORE: Privilegovaní uživatelé nezapočítávají se do počtu licencovaných uživatelů
CORE: Podpora více Storage Group pro DW Cache
DCM,WEB: Podpora DicomWebu u Dicom AE + DICOM plugin pro odesílání
HL7,WEB: Podpora autentizace cloud služeb pomocí tokenu v hlavičce nebo HTTP Basic Auth
WEB: Odhlásit jiného uživatele při zabezpečeném provolání
LIC: Licenční ochrana modulu sdílecích linků
DIGI: Dočasně nefunkční selftest
CLOUD: Prostřednictvím CloudPACS connectoru umožnit zjištění existence vyšetření dle PID
CLOUD: Možnost nastavit délku platnosti vystaveného certifikátu
REPL: Podpora plné (ne proxy) repliky Hanging protokolů

7.2. Odstraněné chyby

DCM: Natvrdo ukončit asociaci, pokud protistrana nereaguje na release
WEB: Opava nezvýraznění chyb při zakládání Pacs Accountu
DW: Oprava aktivace špatné záložky (aktivovala se první místo následující) při zavření aktivní záložky
DW: Oprava nevyžádaného dotažení všech studií pacienta při vyhodnocování HP
DW: Oprava špatného zobrazení layoutu za situace, kdy je fixní časová osa a zobrazí se velké množství záložek
DW3: Opravy chybného zobrazení komponent pro Firefox
DW3: Oprava výchozí hodnoty pro zapnuté Hanging protokoly
DW3: Oprava ikonky pro Mammo zarovnání
DW3: Oprava náhledu instancí v exportovacím dialogu
DW: Rozdělování subsérií do panelů při zapnutém displayOtherSeries
DW: Chybné zobrazení náhledů obrazových filtrů
DW: Chyba při vytváření VideoLock z dat, kde nejsou validní VideoPart
UI: Zobrazení probíhajícího uploadu dat "na pozadí" + možnost vypnout paralelismus importu
DW: Uvolnit z paměti objemy při refreshi stránky
DW: Při přepnutí HP stage se vyresetuje parametr stáří porovnávání
DCM: Chybná validace VR.PN, chybí normalizace PatientName v MWL
DCM: Editace videa - prohozená výška a šířka snímku
DIGI: Capture: start při nefunkčním DNS
DIGI: Nesmyslný čas u nahrávaného videa